



Der Trächtigkeitstest auf der Milch ab 28 Trächtigkeitstage

Für mehr Informationen, kontaktieren Sie
die Milchviehabteilung : :

Tél.: +32 (0)87 69.35.22-23 (Fr) / +32 (0)87 69.35.24-25 (De)

www.awenet.be

**SERVICE
BOVIN
LAIT**






Mit der unterstützung :




Wallonie



FERTILAIT, ein Trächtigkeitstest

- **Zuverlässig** : 97 % Zuverlässigkeit ab 28-60 Trächtigkeitstagen. 100 % ab mehr als 60 Tage.
- **Praktisch** : keine andere Manipulation der Tiere außer dem Melken !
- **Integriert** : die Resultate des Tests werden automatisch in Ihren Herdenbetreuungsapplikationen behandelt ( und ).
- **Komplementär** : zu einer tierärztlichen Reproduktionsbetreuung. Die Tierärzte haben Zugang zu den Reproduktionsereignissen auf  Berater (mit Ihrer Einwilligung).

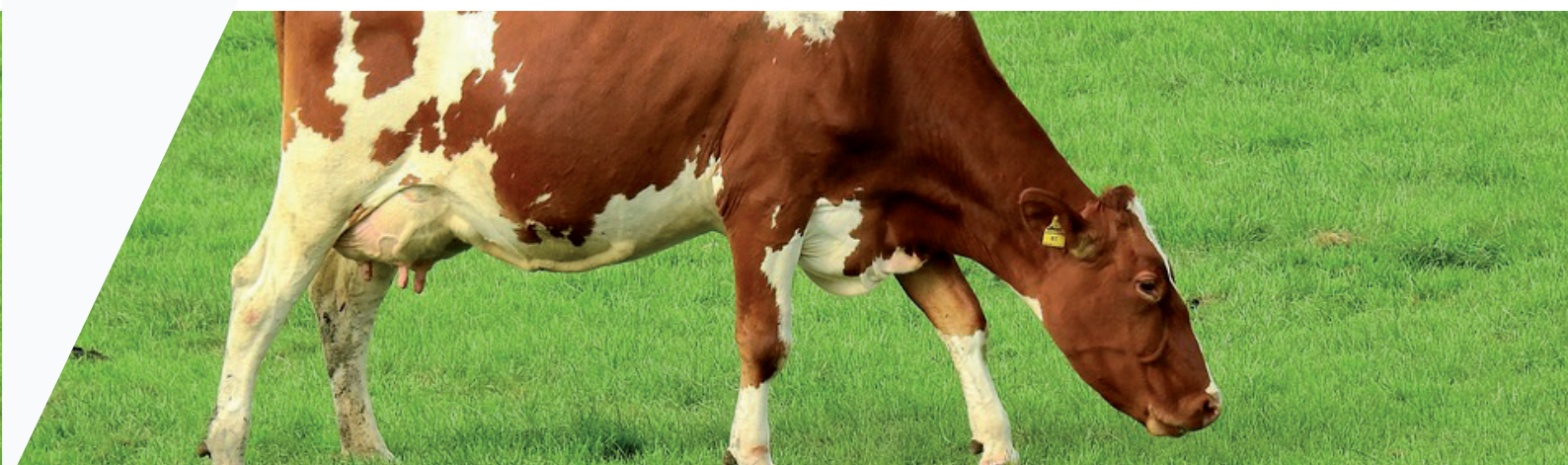

In der Theorie ...

Eine zusätzliche Analyse wird auf der Milchprobe (ELISA-Typ) beim Milchkomitee durchgeführt. Die Konzentration von verbundendem Trächtigkeitsproblem (vTP) wird dosiert.

3 mögliche Resultate :

- * Trächtig (+)
- * Nicht trächtig (-)
- * Zweifelhaft (?)

Diese letzten Resultate (4 % der Proben) werden nicht berechnet und erfordern eine nachträgliche Analyse.

... und in der Praxis !

1. Selektion der Kühe :

Um die Selektion der Kühe zu erleichtern, bekommt der Züchter, der über eine E-Mail Adresse verfügt, die Liste der Kandidatinnen auf Basis der Reproduktionsinformationen, die bei der awé bekannt sind.

2. Identifikation der Probe :

In Zusammenarbeit mit Ihrem Milchleistungsprüfer.




3. Erhalt des Resultats :

Ein Analysenbericht wird Sie am schnellsten durch den gleichen Kanal als Ihre Milchkontrolle übermittelt (Mail/Post).

4. Reproduktionsbetreuung

Durch die my@we.net und  Applikationen, erleichtern Sie sich die Reproduktionsverwaltung Ihrer Herbe in Partnerschaft mit Ihrem Tierarzt (Besamer).

Entwicklung der durchschnittlichen Konzentration in vTP nach den Trächtigkeitstagen

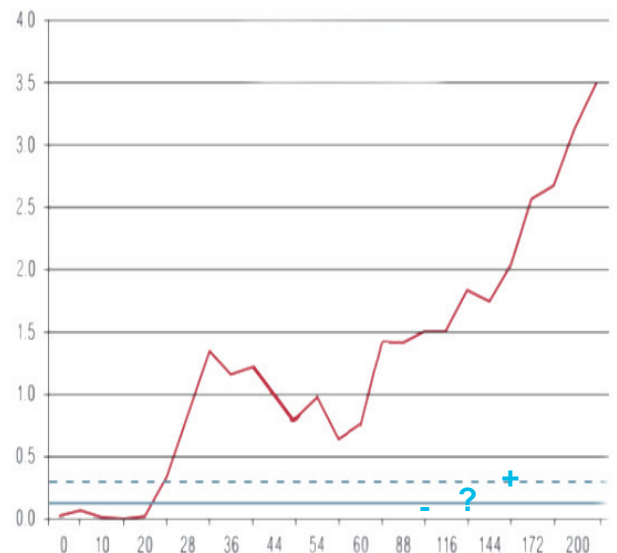

**Sie sind an
dem FERTILAIT
interessiert ?**

**Mitglied der Milch-
kontrolle ?**

oder

**Nutznießer der Check
Lait ?**

**Sprechen Sie darüber mit Ihrem
Milchberater.**

**In Zusammenarbeit mit dem Milch-
komitee Labor**



awé asbl

41, rue de la Clef / B-4650 Herve / Belgium

Tél.: +32 (0)87 69.35.22-23 (Fr) / +32 (0)87 69.35.24-25 (De)

FAX: +32 (0)87 67.52.12 / E-mail : lait@awenet.be

